

Comunikit® Didaria (didattica e riabilitazione)



ComuniKit Didaria rientra nel progetto ComuniKit® ed include una ricchissima raccolta di materiali che costituiscono preziosi strumenti per insegnanti e terapisti.

SCHEMA DATI

ComuniKit® Didaria è **riservato esclusivamente a insegnanti, terapisti, scuole e centri di riabilitazione che ne dichiarino l'uso non esclusivo per singolo paziente/alunno.**

ComuniKit® Didaria contiene diverse **applicazioni software**, oltre ad includere **cofanetti di materiali manipolabili** (OSMO e Fonemi Illustrati). Il pacchetto consente di lavorare sulla **riabilitazione logopedica**, sull'**avviamento alla lettoscrittura**, sul **potenziamento di abilità cognitive visuospatiali**, nonché di **effettuare valutazioni** con soggetti che presentano difficoltà di produzione linguistica.



ComuniKit Didaria propone un'applicazione per la **lettura temporizzata di testi con scansione in sillabe o parole**, utilizzata per il trattamento della dislessia: il contenuto di un testo viene scandito in sillabe o in parole e presentato nella pagina elemento per elemento, con persistenza automatica regolabile o controllata manualmente. Tutti i parametri dell'esercizio di lettura (tipo e dimensioni del testo, interlinea, evidenziazione ecc.) possono essere regolati e adattati alle esigenze di ciascun lettore, costruendo un percorso riabilitativo che permette di incrementare in modo costante e stabile la velocità e la correttezza della lettura. I dati ed i risultati degli esercizi di lettura sono salvati in modo automatico e possono essere visualizzati ed esportati in vari formati (pdf e altri).

Il kit include inoltre un'ulteriore app progettata per affrontare la dislessia, sviluppando alcune specifiche componenti dei processi di lettura e scrittura come **l'analisi fonologica, la sintesi fonemica e l'accesso lessicale**, con finalità dichiaratamente rivolte alla pratica riabilitativa e al potenziamento per bambini a partire dai 6 anni di età. Gli esercizi proposti sono personalizzabili lungo alcuni assi principali (lunghezza delle parole, complessità ortografica, numero dei cloze, ecc.), legati soprattutto all'esigenza di garantire la massima flessibilità e fornire all'educatore una serie di filtri. È consentito personalizzare il programma ed identificare il livello di facilitazione ottimale affinché il compito possa essere eseguito dal bambino.

Un'altra applicazione inclusa è stata sviluppata per supportare terapisti, insegnanti o educatori nella gestione di comportamenti problematici attraverso la creazione di **Token Economy o "sistema di rinforzo a gettoni"**. La gestione del comportamento avviene dunque attraverso un rinforzo positivo (non prevede rinforzi negativi); il bambino ottiene un gettone se non mette in atto il comportamento problematico o se attua quello desiderato. L'accumulo di gettoni consentirà di ottenere un premio finale precedentemente concordato con l'adulto. Nasce come tecnica cognitivo-comportamentale (aiuta i bambini ad assimilare le regole) specifica nei casi di bambini con disturbo da deficit d'attenzione/iperattività, ma può essere utile anche per bambini della scuola d'infanzia e primaria che abbiano difficoltà nel rispettare le regole o in altri contesti. L'app consente di creare delle Token Economy da uno ad un massimo di tre comportamenti. Le immagini dei comportamenti e del premio finale sono personalizzabili, così come è possibile personalizzare il numero di gettoni da accumulare per ottenere il premio e la modalità di ottenimento di un gettone.

Alcuni materiali che arricchiscono le app sono **prodotti in esclusiva per la linea ComuniKit®**, quali ad esempio alcuni esercizi didattici di avviamento alla lettoscrittura ripresi dalla collana DidApp.



La **versione Plus** (con 128Gb, Cellular) include anche una **app di Comunicazione Aumentativa Alternativa** completa di simboli **PCS e Widgit (WLS)**, circa 26000 simboli, per valutare l'uso del tablet come supporto alla CAA. Questa versione arricchita include anche una **custodia antiurto con maniglia ripiegabile**, per favorire l'utilizzo del tablet in autonomia durante le verifiche relative ai software di comunicazione e consentire il posizionamento inclinato durante le attività in postazione fissa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ComuniKit® Didaria versione BASE (CON SCHERMO DA 10,2", 32 GB, WiFi)*

- Configurato con molteplici app. per didattica e riabilitazione
- Osmo Genius Kit (hardware e app.)
- Fonemi illustrati (cofanetto di carte e app.)
- Impostazione per limitazione d'uso (blocco) sull' applicazione desiderata (sblocco tramite password).
- Avviamento iPad
- Creazione account iTunes
- Pre installazione applicazioni
- Aggiornamento e test del prodotto finito
- Guide e manuali in italiano
- fino a 12 ore circa di utilizzo continuo, ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB

Comunikit® Didaria versione PLUS (CON SCHERMO DA 10.2"" , 128GB, WiFi e 4G)*

Stessa configurazione della versione BASE con l'aggiunta di:

- Custodia antiurto con maniglia ripiegabile
- App. per la Comunicazione aumentativa e alternativa completa di simboli PCS e Widgit (circa 26000 simboli) con sintesi vocali italiane e straniere.
- App. per poter scaricare video o filmati dal web sul proprio dispositivo, per poterli usare all'interno dell'app. per la CAA per video modeling o altro.

Entrambe le versioni includono lo zainetto per il trasporto.

Assistenza remota, telefonica o per email

Incluso per 12 mesi dalla data di acquisto un servizio di assistenza remota sul Comunikit® tramite connessione wifi (l'utente deve disporre di una connessione Adsl) o telefonica o per email.



<https://www.leonardoausili.com/>

COPYRIGHT 2018 LEONARDOAUSILI.COM | P.IVA: 01795770351 | ALL RIGHTS RESERVED